

Palma och Lima Vita

VI GRATULERAR TILL ditt val av duschtoalett. Du har bestämt dig för originalet Closomat®, vilket vi tror att du kommer att uppskatta under många år. Den första modellen av Closomat introducerades 1957 av den schweiziske uppfinnaren Hans Maurer. Produkten har sedan dess med framgång marknadsförts och hittat många nöjda användare.

Closomat är än idag den tekniskt mest fulländade duschtoaletten. Det betyder att den kommer att fungera precis som du förväntar dig under många, många år.

Innan du börjar använda din nya Closomat rekommenderar vi att du läser den här bruksanvisningen noggrant. Då får du en god inblick i produktens alla fördelar, och då vet du också att du använder den på rätt sätt.

Tack för förtroendet.

Magnus Ullman


Busck & Co AB

Generalagent för Closomat® i Norden

Så här fungerar Closomat


ANVÄNDNING SOM VANLIG TOALETT

Stå upp (eller res dig upp om du är sittande) och tryck in ett av tryckena. Nedspolningen sker som vanligt.

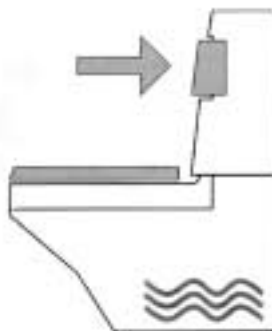


NEDSPOLNING OCH VARMVATTENDUSCH

Sitt kvar på sittringen, tryck in ett av armsbågstryckena och håll kvar trycket tills vattnet känns svalt.

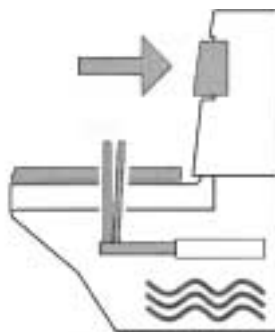

VARMLUFTSTORKNING

Släpp armsbågstrycket och varmluftstorkningen startar automatiskt.

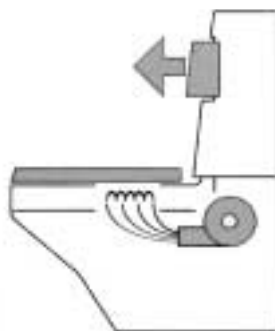

STÅENDE

Stående, alltså utan att belasta sittningen, utlöses den vanliga nedspolningen genom att trycka på höger eller vänster trycke. Det betyder att Closomat alltid kan användas som vanlig toalett, även vid strömlöshet, eftersom nedspolningen då är helt mekanisk.

SITTANDE

Med sittningen belastad kan Closomat användas som duschtoalett. Efter uträttat behov trycker du in, och håller ett av tryckena intryckt med armbågen. Då utlöser du nedspolningen samtidigt som renduschningen startar. Duschmunstycket åker automatiskt ut ur sitt helt skyddade läge och duschar dig mjukt och grundligt ren med kroppstempererat vatten, som långsamt blir allt svalare. Du skall hålla trycket inne tills vattnet känns svalt, dock minst 20 sekunder. Det första varma vattnet spolar rent och öppnar hudporerna, och det svala vattnet sluter åter porerna. Förutom den uppfriskande effekten visar sig denna vattenmassage, som till och med rekommenderas av läkare, ha

god inverkan på den ofta dåliga blodcirkulationen i analområdet. Var därför inte rädd för att dra ut på kallvat-tenduschandet en stund.

När du släpper armbågstrycket avslutas duschningen och duschmunstycket försvinner automatiskt in i sitt skyddade läge. Samtidigt startar varmluftstorkningen och pågår i 2-3 minuter, eller så länge du sitter kvar på sittningen. Ju längre tid du duschar, desto längre går varmluftsfläkten. Om du reser dig upp och avbryter torkningen, är toaletten användbar igen först efter ca tre minuter.

Det bör dock påpekas att även om du suttit kvar hela torktiden, så blir du inte helt torr. Av medicinska skäl bör det inte bli helt torrt i ändtarm och underliv. De flesta brukar vänja sig vid detta efter en kort tids användning.

Har du några frågor är du givetvis välkommen att ta kontakt med oss på Busck & Co AB, tel. 031-87 09 00.

Några viktiga råd

FUNKTION

Duschen fungerar bara när elektriciteten är påkopplad, huvudbrytaren på stolen är tillslagen, vattenkranen öppen och sittringen belastad. Dessutom måste ena armbågstrycket vara intryckt.

Önskas annan duschstyrka eller vattentemperatur, kan detta ändras av servicetekniker.

För individuella behov kan vi erbjuda olika tillbehör, t. ex. pneumatisk brytare för hand/fot eller ryggplatta i stället för armbågstrycke. Vidare finns även förhöjningssockel, mjukgummysits, barnsits med mera. En speciell duschstol och en toalettlift finns även framtagna som specialtillbehör.

VARNING!

- Om du behöver inspektera duschen måste du använda skyddsplattan, som medföljer Closomat.
- Försök aldrig stoppa ner huvudet i toalettskålen.

- Använd bara Closomat som antingen vanlig toalett utan dusch/torkfunktion eller som duschttoalett för att rengöra ändtarmsområdet. Det är då viktigt att du sitter avslappnat på sittringen så att den bakre delen av hålet är täckt.
- Efter operativa ingrepp eller vid blödande sår i ändtarm eller underliv (t. ex. infektionssjukdomar) skall du undvika Closomat-duschen tills såret är tillräckligt läkt. Rådgör med din läkare.
- Småbarn och förståndshandikappade personer bör ej lämnas utan uppsikt på en Closomat.
- Hårda föremål får inte kastas i skålen, inte heller sanitetsbindor, bomull eller annat som kan förorsaka stopp i avloppet.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Closomat behöver knappast något underhåll alls vid regelbunden användning. Om du inte använder toaletten en tid, t. ex. under semestern, rekommenderar vi att du stänger av huvudbrytaren, som normalt alltid bör vara påslagen. När du har satt på huvudbrytaren igen tar det cirka 4 minuter innan apparaten åter är klar för användning.

Closomat rengörs för hand precis som en vanlig toalett. Skålen kan rengöras med alla vanliga toalettreningsmedel och avkalkningsmedel. Du bör dock vara uppmärksam på vilka medel som är skonsammast för miljön. Använd inga "WC-deodoranter" vare sig vid spolkanten eller i spolcisternen.



Vi rekommenderar alla manliga användare att sitta ner även vid urineering. Det gör att varmluftsöppningen skonas från för stor nedsmutsning. Luftutsläppet kan dock utan vidare rengöras med vatten och en passande borste. Börjar varmluften lukta illa är det hög tid för rengöring.

Sittring och plastkåpa är överdragna med syrafast 2-komponentlack. Dessa rengörs med trasa eller svamp och vanligt rengöringsmedel.

Det ut- och ingående duschmunstycket är så konstruerat att det inte blir nedsmutsat vare sig i viloläge eller under användning. Detta har konstaterats i upprepade bakteriologiska undersökningar. Någon särskild rengöring behövs därför inte. Sprinklerhålen är skyddade mot förkalkning genom sin konstruktion. Om du trots detta vill komma åt munstycket, se instruktion på nästa sida.

SÄRSKILD RENGÖRING AV SPOL- MUNSTYCKE

- Tag av kåpan. Ovanpå locket till spolcisternen sitter ett specialverktyg till duschmunstycket.
- Lossa verktyget från fästet och stoppa in den spetsiga ändan (se illustration, punkt 1) underifrån i munstycket.
- Drag ut munstycket (2) mot den mothållande fjädern. Drag tills det tar emot och munstycket är i sitt yttersta läge. Håll fast munstycket med den fria handen.
- Vänd nu verktyget och stoppa ovanifrån in det i spåret (3) i munstycket enligt illustrationen. Munstycket är nu spärrat i sitt yttersta läge och det rinner vatten i munstycksöppningen.
- Rengör munstycket.
- Håll fast munstycket med en hand och tag bort specialverktyget med den andra. Släpp långsamt in munstycket till sitt viloläge.
- Sätt tillbaka specialverktyget på sin plats och montera kåpan.

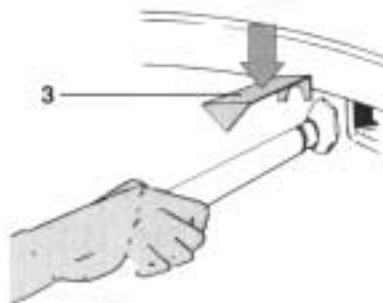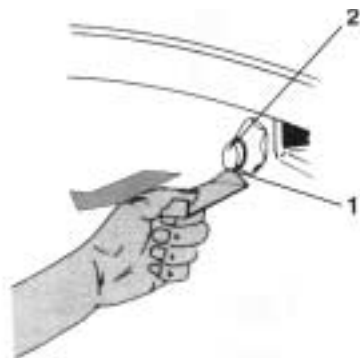

OBSERVERA!

Använd under inga omständigheter slipande putsmedel eller rivande trasor. Ställ upp sittringen om du använder kalklösningsmedel i skålen.

Ångtvätt är absolut förbjudet när det gäller Closomat.

Andra delar än toalettskålen får inte rengöras med rinnande vatten.

Avstå från doftstenar och andra produkter som anbringas vid spolkanten.

Kåpan får endast avlägsnas av fackfolk. Därunder ligger spänningsförande delar.

FELSÖKNING

Om duschen inte fungerar:

- Kontrollera att strömbrytaren på toalettens högra sida är tillslagen. Nollan skall ej synas.
- Lägg på den genomskinliga skyddsplattan (som levereras med toaletten) mellan porslinet och sittningen.
- Tryck med ena handen ned sittningen i bakkant, d.v.s. belasta gångjärnen.
- Tryck med andra handen in ett av de båda armbågstryckena.

Om duschen fortfarande inte fungerar, kontrollera:

- Att säkringen till toaletten är hel.
- Att en eventuell jordfelsbrytare ej har löst ut.
- Att vatten rinner till i spolcisternen.

OM DU BEHÖVER HJÄLP

Gäller det vatten- eller avloppstekniska problem såsom stopp i avloppet, dålig spolning, långsam tillrinning av vatten i

spolcisternen eller rinnande vatten i toalettskålen, kontakta närmaste VVS-installatör. Vid andra driftstörningar ska du kontakta Busck & Co AB.

GARANTI

Du har 2 års garanti vad gäller fabriktionsfel. Fyll i det bifogade servicekortet och skicka till Busck & Co AB.

ENERGIFÖRBRUKNING

Energiförbrukningen för Closomat är ca 0,8 kWh per dygn vid sex användningar per dygn.

PLATS FÖR EGNA ANTECKNINGAR

Lined area for notes consisting of 20 horizontal lines.

closo mat[®]

Toalettstolen med inbyggd dusch och tork

BUSCK & CO AB. BOX 16007, 412 21 GÖTEBORG.
TELEFON 031-87 09 00. FAX 031-87 27 12. www.busck.se